



# COME USARE LE TIPS?

## Z-VIBE O Z-GRABBER

Lo Z-Vibe® è venduto con una probe tip.

Lo Z-Grabber® è venduto con una chewing tip XL.

La vibrazione può essere accesa e spenta a seconda delle necessità.

## CONSIGLI PER UNA TERAPIA DI SUCCESSO

*Non c'è vergogna nel non sapere nulla, ma c'è vergogna nel non voler imparare nulla.*

### *Platone*

- Ogni paziente dovrebbe essere trattato individualmente. Applicare una semplice sequenza di esercizi non è un metodo adatto a tutti i pazienti
- Fidati della tua esperienza e intuizione! Il migliore dei manuali non potrà insegnarti tutto!
- La collaborazione è la chiave del successo! Logopedisti, Terapisti occupazionali, dottori e genitori sono tutti fondamentali per una buona cooperazione.
- Coinvolgere i genitori nella terapia è essenziale! Una nuova routine può solo essere stabilita attraverso l'esercizio e il lavoro consistente.
- Prima di provare un nuovo esercizio, provalo su te stesso. Com'è la pressione? La velocità? Ha un obiettivo specifico?
- Gli esercizi sensoriali dovrebbero essere accompagnati da esercizi funzionali. Per esempio: dopo aver stimolato il fondo della lingua del paziente, prova a fargli pronunciare una /k/.
- Ripeti i vari esercizi. Osserva la reazione alle stimolazioni e comportati di conseguenza.

## LE TIPS

### PROBE TIP/ MINI TIP



3 superfici diverse, la mini tip è una versione più piccola della probe tip. Sono particolarmente adatte per stimolazione extra-orale o intra-orale. Incoraggia consapevolezza ed esplorazione orale.

### PREEFER TIP



Progettata nello specifico per eseguire movimenti rotatori. Può essere utilizzata extra-oralmente (ad esempio per stimolare la chiusura delle labbra) o intra-oralmente.

### FINE TIP



Particolarmente adatto per mostrare punti all'interno del cavo orale.

### SPOON TIPS TESTURIZZATE



L'unica differenza tra queste tips e le spoon tips è la superficie testurizzata sul retro dei cucchiaini. La texture irregolare aiuta spesso nell'introduzione di nuove consistenze, rendendole più tollerabili. Offre inoltre stimoli sensoriali al labbro inferiore e alla lingua.

### SPOON TIPS



Progettato nello specifico per la terapia alimentare. La forma appiattita del cucchiaino permette di tenere il cibo senza riempire il cucchiaino esageratamente. La versione mini è adatta per neonati e bambini più piccoli, mentre quella grande è perfetta per adulti e bambini più grandi.

### TIPS ABBASSALINGUA



Perfette per la valutazione, ma anche come strumento per esercitare l'elevazione della lingua e la chiusura delle labbra. Sono ottime anche per fornire input sensoriali a grandi aree all'interno e all'esterno del cavo orale.

Sono disponibili sia lisce che in versione testurizzata.

### BITE'N'CHEW TIP



Questa punta tonda, liscia e masticabile può essere utilizzata per allenare i muscoli masticatori (stabilità, forza mandibolare e del morso).

Può anche essere utilizzata per una stimolazione extra-orale e per massaggiare i trigger point.

### BITE'N'CHEW TIP XL



Stessa applicazione della Bite'n'chew originale. La maggiore lunghezza permette di raggiungere con facilità anche i molari, rendendolo un ottimo strumento per allenare la masticazione o desensibilizzare l'area dei molari. Disponibile anche in versione testurizzata (in giallo).

## BITE TUBE TIPS



Simili alle Bite'n'chew tips, solo che sono vuote.

Puoi riempirle con cibi morbidi per allenare il morso funzionale e la masticazione, o per introdurre nuovi cibi.



## BUTTON TIPS

Disponibili in 4 dimensioni diverse. Utili soprattutto per aumentare la forza delle labbra.

Possono anche essere utilizzate per allenare i muscoli della lingua.



## POPETTE TIP

Può tenere lecca lecca, ma anche tamponcini orali. Le vibrazioni possono essere utilizzate per lavorare su diverse funzioni.

Ricorda di assicurarti che il bambino non abbia allergie o intolleranze prima di usare i leccalecca nella terapia.



## ANIMAL TIPS

Diversi animali presentano diverse opportunità di applicazione, oltre ad essere accattivanti anche per i nostri pazienti più piccoli!

Il bite block sul retro può essere utilizzato per il grading mandibolare (ogni animale presenta uno spessore diverso).



## TONGUE TIP

Questa tip aiuta a isolare la lingua, allenare movimenti precisi o guidare passivamente la lingua.

Può essere utilizzata anche come "raschietto" per la lingua.



## Y-TIP BITE BLOCKS

Progettato per lavorare sul grading mandibolare e sulla stabilità. Ogni braccio ha uno spessore diverso per lavorare su diversi posizionamenti della mandibola.

Oltre ad allenare la mandibola, questi tips possono essere utilizzati per stimolare la chiusura delle labbra.



## HARD/SOFT BRUSH TIPS

Disponibile in versione morbida (blu) e dura (gialla).

Può essere utile per trattare persone con ipersensibilità orale.

La punta blu è l'ideale per massaggiare le gengive, mentre quella gialla è utile per facilitare la transizione allo spazzolino.

## ROLLER TIP



La roller tip è particolarmente adatta per stimolare faccia, collo, braccia, spalle e mani.

## FLAT SPOON TIP



La forma piatta del cucchiaino rende questa punta perfetta per aumentare l'attività muscolare anche mangiando cibi morbidi.

Disponibile sia liscia che testurizzata, per un maggiore stimolo sensoriale.



Progettate per allenare la chiusura delle labbra e la forza della masticazione.

Il set include 3 diversi livelli di difficoltà - in modo da poter migliorare gradualmente la forza e resistenza dei muscoli.

## BRICK TIPS



Disponibili in 3 diversi livelli di durezza, forniscono stimoli sensoriali grazie ai rilievi di dimensioni diverse.

Lo Z-Vibe e le sue tips sono ideali perché vibrazione e masticazione hanno un effetto calmante per molte persone!

Tutte le tips possono essere lavate in lavastoviglie!

Assicurati che non ci siano cibi coloranti nella lavastoviglie (ad esempio sugo o spezie), dato che potrebbero tingere sui materiali. In qualsiasi caso, il colore dovrebbe venire via con un altro lavaggio!

Z-Vibe® e Z-Grabber® non dovrebbero entrare in contatto con l'acqua, data la presenza di una batteria al loro interno. Bagnarli potrebbe causare ruggine e rovinarli.

