



by



Myospots sind biologisch abbaubare, selbsthaftende Klebescheiben, die verwendet werden, um die Zungenmuskulatur zu trainieren und die Zunge zu heben um sie an der Zungenruhelage ruhen zu lassen.

Inhalt: Eine Dose enthält 100 Stück.

Aufbewahrung: Lagerung unter 30 Grad, trocken und vor Sonnenlicht schützen

Anwendung: Der Gaumen sollte sauber und trocken sein.

Platzieren Sie den Myospot am Daumen und drücken sie ihn sanft für 10 Sekunden mittig auf den vorderen Teil des Gaumens (dort wo die Rillen zu spüren sind). Entfernen Sie Ihren Daumen und positionieren Sie Ihre Zungenspitze am Myospot.

Verwenden Sie den Myospot nicht während des Schlafes!

Bei Schwierigkeiten, den Myospot am Gaumen zu befestigen, versuchen Sie, den leicht anhaftenden Myospot mit Speichel von der Zungenspitze zu benetzen, bevor Sie mit dem Myospot Druck auf den Gaumen ausüben.

Hinweis: Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich. Verschließen Sie den Behälter daher immer gut. Die Spots sollten innerhalb von 60 Tagen aufgebraucht werden.

Nicht kauen oder schlucken – Der Myospot kann beim Verschlucken an der Speiseröhre haften bleiben und Beschwerden verursachen. Falls er irrtümlich verschluckt wurde, versuchen Sie etwas zu essen. Im Normalfall löst er sich und gelangt in den Magen, wo er sich von selbst auflöst.

! Erstickungsgefahr – nicht für Kleinkinder unter 2 Jahre geeignet. Kinder von 2 – 6 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht verwenden.

Zusammensetzung: Myospots sind biologisch abbaubar und sicher für den menschlichen Verzehr. Die Spots bestehen aus Algen Agar, Xanthan, Stevia, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, natürliche Farb und Geschmacksstoffe. Keine tierischen Inhaltsstoffe. Kein Gelatin. Keine synthetischen Farb- oder Geschmacksstoffe, Vegan und auch Halal und Kosher freundlich.



Hergestellt in der Schweiz durch
Acino Pharma und Eigentum der
Myospots Australia Pty Ltd.

www.LOGICANA.at
office@logicana.at