



Z-VIBE® ODERR Z-GRABBER®

Der Z-Vibe® wird mit dem
Untersucher Aufsatz geliefert.
Der Z-Grabber® mit dem
texturierten Kau-Aufsatz in XL.

Vibration kann ein- oder
ausgeschaltet werden

DIE AUFSÄTZE ERKLÄRT:

TIPPS FÜR DEN ERFOLG DEINER PATIENTEN

*Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl
aber, nichts lernen zu wollen.*

Platon

- Jeder Patient soll individuell behandelt werden. Das reine Durchführen einer Reihenfolge von Übungen passt nicht für alle Patienten.
- Vertraue auf deine Erfahrung und Intuition! Das beste Lehrbuch kann dir nicht alles beibringen!
- Interdisziplinäres Arbeiten ist der Schlüssel zum Erfolg! Physio, Ergo, Ärzte als Fachpersonal und die Eltern als Basis für die gute Zusammenarbeit.
- Das Miteinbeziehen der Eltern in die Therapie ist essentiell! Neue Routinen können nur durch Training und konsequenter Arbeit etabliert werden.
- Bevor du eine neue Übung ausprobierst, probiere es an dir selbst. Wie ist der Druck, die Geschwindigkeit? Gibt es ein spezielles Ziel der Übung?
- Sensorische Übungen sollten mit funktionellen Übungen gekoppelt sein. Z.B.: nachdem der Zungenrücken stimuliert wurde, lass deinen Patienten ein /k/ sprechen.
- Wiederhole verschiedene Übungen. Beobachte die Reaktion auf die Stimulation und handle basierend auf dieser Reaktion.



DIE AUFsätze



UNTERSUCHER AUFsatz



3 verschiedene Oberflächen, der Mini Aufsatz ist die kleinere Version davon.

Besonders für extra- und intraorale Stimulation geeignet. Aufmerksamkeit und orale Erkundung können damit gefördert werden.

PREFEER



Wurde speziell für rollende Bewegungen entworfen. Kann intraoral oder auch extraoral verwendet werden (z.B. um den Lippenschluss zu stimulieren).

FEINER AUFsatz



Besonders geeignet um Punkte innerhalb der Mundhöhle zu zeigen.

TEXTURIERTE LÖFFEL AUFsätze



Diese Aufsätze unterscheiden sich lediglich durch die hügelige Oberfläche auf der Rückseite der Löffelschüssel. Die Unebenheiten helfen oft dabei, dass neue Konsistenzen/Texturen toleriert werden. Oder es wird mehr Aktivität, durch Stimulation der Unterlippe bzw. höheren sensorischen Input auf der Zunge, gezeigt.



LÖFFEL AUFsätze

Speziell für die Fütter- und Esstherapie hergestellt. Die flache Löffelschüssel kann genau so viel Nahrung aufnehmen wie nötig ohne zu überladen.

Der kleine Löffel-Aufsatz ist für Babies und Kleinkinder. Der große Löffel-Aufsatz ist für Kinder und Erwachsene.

SPATEL AUFsätze



Perfekt für die Diagnostik geeignet, aber auch als Trainingstool: Elevation der Zungenmitte oder Zungenrücken. Lippenschluss und/oder sensorischer Input für große Flächen im/außerhalb der Mundhöhle. Als glatte oder texturierte Version erhältlich.

BITE'N'CHEW AUFsatz



Dieser runde, glatte und kaubare Aufsatz wird zum Training der Kaumuskelatur (Stabilität, Kieferkraft oder zum Beisstraining) eingesetzt.

Außerdem können damit auch extra-orale Stimulationen, sowie Triggerpunkt-Massagen angeboten werden.



BITE'N'CHEW AUFsatz XL

Gleiches Einsatzgebiet wie der kleine Bruder in grün. Dadurch, dass der hellblaue Kau-Aufsatz länger ist, erreicht er auch mühelos die Molaren und kann daher zum Kau-Training oder als Desensibilisierungs-Tool des Backenzahnbereichs verwendet werden.

Auch in texturiert (gelb) verfügbar.



KAUSCHLAUCH AUFsätze

Ähnlich wie die Bite'n'chew Aufsätze, nur sind sie hohl. Fülle die Aufsätze mit Püree oder Lebensmitteln, um funktionelles Beissen und Kauen zu trainieren oder neue Lebensmittel einzuführen.



KNOPF AUFsätze

Die Knopf Aufsätze gibt es in 4 verschiedene Größen. Die wohl bekannteste Verwendung ist die Knopf-Übung zur Steigerung der Lippenkraft. Die Knopf-Aufsätze können z.B. auch zum Training der Zungen-Muskulatur verwendet werden.



POPETTE AUFsatz

Nicht nur Lollipops, sondern auch Mundschwämme o.ä. können vom Popette Aufsatz gehalten werden. So kann Vibration hinzugefügt werden um an verschiedenen Funktionen zu arbeiten.

Bitte beachte Allergien oder Unverträglichkeiten bevor du Lollipops etc verwendest.



TIER AUFsätze

Verschiedene Tiere mit verschiedenen Einsatzgebieten, In jedem Fall aber sehr ansprechend für die kleinsten unserer Patienten!

Der Beissblock am "Rücken" der Tiere kann als Kiefergraduierungstool verwendet werden (pro Tier eine andere Stärke).



ZUNGEN AUFsatz

Der Zungenaufsatz von ARK unterstützt dabei die Zunge zu pointieren, zielgerichtete Bewegungen zu trainieren oder sie auch passiv zu führen.

Außerdem kann der Zungenaufsatz auch als Zungenschaber eingesetzt werden.



KIEFER- GRADUIERUNGS AUFsätze

Speziell dafür entwickelt um an Kiefergraduierung und -stabilität zu arbeiten. Jeder Arm hat eine unterschiedliche Dicke um an verschiedenen Kieferpositionen zu arbeiten.

Neben dem Kiefertraining können diese Aufsätze aber auch zur Stimulation des Lippenschlusses verwendet werden.



BÜRSTEN AUFsätze

Verfügbar in weich (blau) und hart (gelb). Personen mit oralen Hypersensitivitäten kann dabei geholfen werden diese abzubauen. Der blaue Bürsten Aufsatz ist ideal um auch das Zahnfleisch zu massieren, während der gelbe Aufsatz dabei unterstützen kann auf eine normale Zahnbürste zu wechseln.



ROLLER AUFsatz

Der Roller Aufsatz ist besonders zur Stimulation des Gesichts, des Halses, aber auch von Armen, Schultern, Händen geeignet.



FLACHER LÖFFEL- AUFsatz

Die flachen Löffelaufsätze sind toll um pürierte Speisen mit mehr Muskelaktivität vom Löffel zu nehmen.

Erhältlich in glatt oder texturiert, gibt die texturierte Version noch mehr sensorischen Input.



SQUEEZER AUFsätze

Die Squeezer Aufsätze wurden speziell für den Lippenschluss und die Kaukraft entworfen. 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen sind in diesem Set erhältlich-so kann die Kraft und Ausdauer der Muskulatur gefördert werden.



BRICK AUFsätze

Die Brick Aufsätze sind in 3 verschiedenen Härtegraden erhältlich und bieten mit ihren großen Noppen einen sehr deutlichen sensorischen Input.

Einige Personen möchten den Z-Vibe mit der Vibration auch als Beruhigungstool verwenden-hierfür sind die Aufsätze ideal, denn Kauen und Vibration hat einen absolut beruhigenden Effekt für viele!

Die Aufsätze können im Geschirrspüler gereinigt werden!

Bitte achten Sie darauf, dass im Geschirrspüler keine färbenden Lebensmittel, wie z.B. Tomatensosse oder Curry sind. denn die Materialien könnten die Farbe annehmen. Diese sollte sich aber nach einem weiteren Waschgang wieder lösen!

Das Gehäuse des Z-Vibe® oder Z-Grabber® sollte nicht mit Wasser in Verbindung kommen. Im Inneren befindet sich eine Batterie. Wird diese nass, besteht die Gefahr, dass der Vibrationsstift zu rosten beginnt, wodurch er nicht mehr verwendet werden kann.

