

Die Wahl der Größe Ihres Froggymouths hat einen Einfluss auf die Effizienz der Behandlung.

Die Lippen sollten im entspannten, geschlossenen Zustand nicht durch den Froggy Mouth gedehnt werden. Der Abstand zwischen den Mundwinkeln sollte also etwas größer sein als das gewählte Modell.

Technische Erklärung:


Die Wahl einer kleineren Größe ermöglicht es, die Lippen nicht zu dehnen. Eine Dehnung hätte eine unphysiologische Propriozeption zur Folge. Das Ziel des Froggymouth ist es, die motorische und sensorische Aktivität des Gesichtsnervs, der die Lippen stimuliert, zu hemmen.

Vertikal gibt es keine Unterschiede:

Der vertikale Spalt des Froggymouth unterscheidet sich nicht je nach Größe der Apparatur. Der Spalt entspricht der physiologischen Öffnung des Mundes und erlaubt es dem Patienten nicht, einen Lippenverschluss zu erzeugen, der der erste Schritt der Saug-Schluck-Sequenz ist.

In der Regel hängt die Wahl der Größe des Froggymouths von der klinischen Erfahrung der/s Arztes*in/Therapeuten*in ab, wobei die oben aufgeführten Informationen berücksichtigt werden.

Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen jedoch, ein kleineres Gerät zu wählen. Ein kleineres Gerät ist niemals weniger effizient, es geht nur um den Komfort.

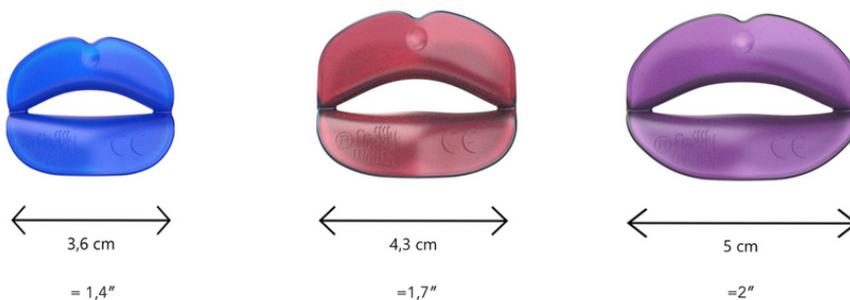

Sollten Unsicherheiten auftreten, sind wir gerne bereit, diese aufzuklären:

Melanie Haslinger
info@logicana.at
+43 676 7053463

