

# MYOTAPE

Erfahre mehr unter  
[www.MYOTAPE.at](http://www.MYOTAPE.at)  
oder  
[info@myotape.at](mailto:info@myotape.at)



MYOTAPE. SAFE,  
SLEEP, SCIENCE

## UNTERSTÜTZT DICH BEI DER WIEDERHERSTELLUNG DER NASENATMUNG

Personen, die durch den Mund atmen  
leiden häufiger unter Angst- und  
Panikstörungen, Schlafstörungen und  
begleitenden Erkrankungen.

MYOTAPE begleitet DICH Nasenatmung  
(wieder) zur gesunden Gewohnheit zu  
machen.


Mit über 18 Jahren an klinischer Erfahrung  
und Wissenschaft, kann MYOTAPE von  
Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren  
verwendet werden.

Erfahre den besten Schlaf deines Lebens &  
wache gesund und fit auf.

### WARUM IST NASENATMUNG WICHTIG?

- Wissenschaftler haben während COVID-19  
herausgefunden, dass das Tapen der  
Lippen während des Schlafes die  
Entstehung von Erkältungen  
reduziert. Besonders nach einem  
stressigen Tag.
- Sie ist wichtig für ein gesundes Gesichts-  
Kiefer-Wachstum bei Kindern.
- Erhöht Stickstoffmonoxid in den  
Atemwegen, das die Arbeit der Blutgefäße  
in den Lungen unterstützt.
- Stickstoffmonoxid hat eine anti-virale und  
anti-bakterielle Wirkung, unterstützt das  
Immunsystem im Kampf gegen Aerosole.

VOORTEILE Erwachsene	VOORTEILE für Kinder
weniger Mundgeruch	unterstützt kieferorthop. Behandlung
Unterstützt CPAP - Anwendung	gesundes Atemwegs-Wachstum
Weniger Asthma und Atemwegs-Irritation	Weniger Risiko von Verhaltens-Auffälligkeiten
weniger Angstzustände	Reduziert das Risiko von Lern-Schwierigkeiten
Bessere Zahngesundheit	
reduziert Schnarchen mildes obstruktives Schlafapnoe - Syndrom (OSAS)	
besserer Schlaf & Fokus, weniger Ermüdung	

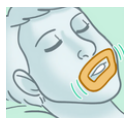


**Ermöglicht das „Mouth-Puffing“:** durch einen vollständigen Lippenverschluss könnte sich obstruktives Schlafapnoe-Syndrom verschlimmern.




**Ermöglicht das Öffnen im Notfall:** Weniger Angst und sicherer, falls der Mund geöffnet oder etwas getrunken werden muss.


### Gesunder Schlaf - Gesunde Atmung

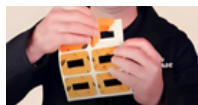

vom Trägerpapier lösen

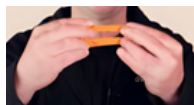

20-30% vordehnen

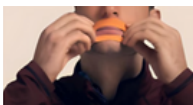

Klebe das MYOTAPE rund um Ober- und Unterlippe



mit sanftem Reiben anhaften

⚠ Nicht für Kinder unter 4 Jahren

